

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年12月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100210
作業年月日	平成24年12月14日		作業時間:	1 Hr
顧客名	小幡医院		TEL:	03-3489-6005
所在地	〒201-0015 東京都柏江市猪方3-23-1		担当	様
販売店	(株)スズケン 多摩営業所 小林様		担当	様
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合・異常なし

不具合原因、作業内容

保守点検実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 712
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.79 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機器動作に問題ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数:	/	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌:	876	殺菌+7L:	0
	リークチェック:	0	自己洗浄:	425	7Lコイル単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計 Assy		☒	1	エネワ継手 (本体側)		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	エネワ継手 (コネクタ側)		☒	2
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
濃度計 ノン-		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

24年12月14日

ご署名 徳田 裕子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	