

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	100144
作業年月日	平成24年12月14日	作業時間	1.5 Hr
顧客名	佐々木病院	TEL	045-581-3123
所在地	神奈川県横浜市鶴見区下末吉 1-13-8	担当	様
販売店	(株)メディカルシステムズ	担当	柳 様
納入年月日	平成23年2月7日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常はありませんでした。

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 305
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ 左下部分に電線が引っかかっている。	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機器動作に異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数	1609	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌	4817	殺菌+7L	0
	リークチェック	0	自己洗浄	543	アルコール単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計 Assy		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	2
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	2
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
濃度計ホルダー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24年 12月 14日

ご署名 相良 憲彦 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

