

修理完了報告書

NO.757

お客様	南房総ファミリアクリニック 様			機種	ONW-10
所在地	住所:千葉県南房総市本織43-1 電話:0470-20-6171			機番	384
販売店				納品日	平成16年 4月23日
				依頼日	平成24年 11月6日
作業者	山本	作業時間	360分以上	作業日	平成24年 12月6日

修理依頼・苦情内容

定期メンテナンスの作業及び前回の指摘事項確認他点検
前回指摘事項:(電磁弁・コンプレッサーの劣化)

不具合原因(故障箇所)と処理内容

(1) 点検結果(不具合箇所と不具合原因)
下記部品の交換を実施致しました。

交換後弊社にて機器を何回か作動させて点検を実施致しました。
作動確認・性能確認実施。
試運転を10回以上実施。⇒特に異常問題なし。

■備考

オゾン濃度0.52。酸素濃度95%以上

吸着筒・吸湿筒・電磁弁ダイヤフラム・オゾンセンサー・ドレンフィルター・オゾン分解触媒

エアーコンプレッサー



作業風景



交換推奨部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	ドレンフィルター	1式	
	酸素発生装置用 吸着筒・吸湿筒	1式	
	オゾン分解触媒	1	
	オゾンセンサー	1	
	給水電磁弁ダイヤフラム	2	
	エアーコンプレッサー	1	

上記作業すべて終了したことを確認しました。

サイン: