

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100203	
作業年月日	平成 25 年 1 月 11 日		作業時間	1.5 Hr	
顧客名	みさと中央クリニック		TEL	048-953-5300	
所在地	埼玉県三郷市新和 1-36		担当	様	
販売店	フルフレック社		担当	様	
納入年月日	平成 22 年 12 月 12 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合は特に無し	
不具合原因、作業内容	
点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 874
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
機器動作に異常ありませんでした。	

装置 情報	交換後運転回数	390	更新（リセット）実施・未実施	更新 ☒	殺菌	720	殺菌+7L	0
	リークチェック	74	自己洗浄	253	アルコール単独	0	エア単独	2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計A用		☒	1	エアクリーン（本体用）		☒	1
オゾン分解触媒		☒	1	エアクリーン（コネクタ用）		☒	1
オゾンセンサ		☒	1			☐	
濃度計フルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
みさと中央クリニック

ご署名 院長 高橋 公一

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	山本