



# 内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社HPIンバウラ  
環境事業部

日付: 2013、1、

作業者 菅田和樹

ONW-10機番: 001586

PSA機番: SPS-

客先: 佐野医師会病院 横

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 定期交換部品                                  |     |
| 吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- )     | 合/否 |
| ドレン用フィルターを交換したか                         | 合/否 |
| 排水シリコンチューブを交換したか                        | 合/否 |
| オゾン分解触媒を交換したか                           | 合/否 |
| 配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと              | 合/否 |
| 取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか          | 合/否 |
| PSA性能確認                                 |     |
| 圧カスイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)         | 合/否 |
| 酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) ( 95 %)     | 合/否 |
| 酸素流量は適切か (0.79~0.82L/min) ( 0.82 L/min) | 合/否 |
| PSA圧力の確認 ( 0.099 Mpa) ~ ( 0.178 Mpa)    | 参考値 |
| 外装の取付                                   |     |
| オゾンセンサーは配線したか                           | 合/否 |
| フロントパネルのランプは配線したか                       | 合/否 |
| フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か                   | 合/否 |
| ドレンチューブは接続したか                           | 合/否 |
| 確認事項                                    |     |
| フタパッキンに割がれはないか                          | 合/否 |
| 内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か                 | 合/否 |
| 洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)        | 合/否 |
| 定期メンテナンスシールに点検日を記入したか                   | 合/否 |
| 定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)    | 合/否 |
| 別紙 点検確認書に記録したか                          | 合/否 |
| 確認試験                                    |     |
| オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)         | 合/否 |
| 運転は正常か、エラーはでないか                         | 合/否 |
| インジケータの変色は良好か                           | 合/否 |
|                                         |     |
|                                         |     |
|                                         |     |
|                                         |     |

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)