

公平病院

御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：



点検年月日	平成 25 年 2 月 6 日	機種名	ONW-10	製造機番	000261
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.5%	流量: 0.75 L/min	圧力: 0.098~0.170 MPa	
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

25年 2月 6日

ご署名 田口 淳子



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ

環境事業部

日付: 2013年2月6日

作業者 星 住

ONW-10機番: 000261

PSA機番: SPS- 10763

客先: 公平病院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合	否
ドレン用フィルターを交換したか	合	否
排水シリコンチューブを交換したか	合	否
オゾン分解触媒を交換したか	合	否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合	否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合	否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合	否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (92.5 %)	合	否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.75 L/min)	合	否
PSA圧力の確認 (0.098 Mpa) ~ (0.170 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合	否
フロントパネルのランプは配線したか	合	否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合	否
ドレンチューブは接続したか	合	否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合	否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合	否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合	否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合	否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合	否
別紙 点検確認書に記録したか	合	否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合	否
運転は正常か、エラーはでないか	合	否
インジケータの変色は良好か	合	否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

ドレンフィルターは次回ハウジングで交換必要。(フィルター固定ネジの不具合あり)