

所沢肛門病院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者:



点検年月日	平成 25 年 2 月 21 日	機種名	ONW-10	製造機番	001358
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未使用	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.4 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☐	濃度: 80.1%	流量: 0.76 L/min 圧力: 0.073~0.115 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	酸素濃度の低下あり。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

埼玉県所沢市西町1-3
所沢エムシーサービス
TEL 04-2647-7045

25 年 2 月 21 日

ご署名

坂下 敏江

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ

環境事業部

日付: 2013年2月21日

作業者

星住

ONW-10機番: 001358

PSA機番: SPS-11058

客先: 所沢肛門病院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10576)	(合) / 否	
ドレン用フィルターを交換したか	(合) / 否	
排水シリコンチューブを交換したか	合 / (否)	
オゾン分解触媒を交換したか	(合) / 否	
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	(合) / 否	
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	(合) / 否	
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	(合) / 否	
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (80.1 %)	合 / (否)	
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min) (0.76 L/min)	(合) / 否	
PSA圧力の確認 (0.073 Mpa) ~ (0.115 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	(合) / 否	
フロントパネルのランプは配線したか	(合) / 否	
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	(合) / 否	
ドレンチューブは接続したか	(合) / 否	
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	(合) / 否	
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	(合) / 否	
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	(合) / 否	
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	(合) / 否	
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	(合) / 否	
別紙 点検確認書に記録したか	(合) / 否	
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	(合) / 否	
運転は正常か、エラーはでないか	(合) / 否	
インジケータの変色は良好か	(合) / 否	

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

濃度低下。