

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号 02-35371 No. 130128

配布先	納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿	機種	OED-1000
客先 1	顧客名	わたなベクリニック 様	機番	100145
環営 1	所在地	東京都品川区西五反田4-3-1	納入日	平成23年3月1日
環品 1	点検者	小野 定之	受付日	平成25年1月21日
	作業時間		出荷日	平成25年1月23日
計 3	返送先	納入先と同じ		

修理依頼・不具合内容

タッチパネル起動不良


※タッチパネル S/N : 087374H010102 DATE 03/10

不具合原因（故障箇所）と処置予定

【1】点検結果（不具合箇所と不具合原因）

タッチパネルを起動しても、画面全体がオレンジ色の状態のまま次の画面に移行しない現象を確認しました。（写真参照）
このタッチパネルを別の機械に取付けても同じ現象であることから、タッチパネル単独の故障と判断し、交換しました。

写真：タッチパネル画面不具合状態

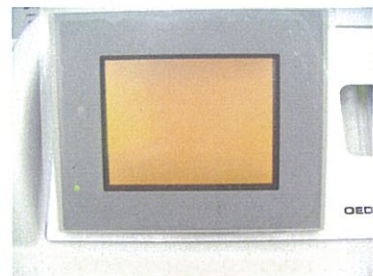

【2】修理・点検内容

- 1：部品交換（下表をご参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定：0.74ppm・・・正常
- 3：オゾン水濃度信号パルス数：276・・・正常
- 4：運転プログラム交換：Ver0103⇒Ver0104
- 5：酸素流量測定：0.76L/min・・・正常
- 6：運転確認・・・・・・・・・・・・・正常

【3】出荷時の装置情報

タッチパネルの故障に伴い運転回数および殺菌履歴データが壊れて復旧できない状態でした。
殺菌：4 殺菌＋アルコール：1 リークチェック：0 自己洗浄：1、ア単独：0 エア単独：0

—以上—

承認

審査

作成

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762302530	タッチパネル	1個	

（株）JHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528