

時計台メディカルクリニック

御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者:



点検年月日	平成 25 年 3 月 15 日	機種名	ONW-10	製造機番	000482
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未使用	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.3 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度:	93.6%	流量:	0.77 L/min
					圧力:	0.09~0.165 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

25.3.15

25年 3月 15 日

時計台メディカルクリニック 印

ご署名

市川直哉

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ

環境事業部

日付: 2013年3月15日

作業者 星 住

ONW-10機番: 000482

PSA機番: SPS-10425

客先: 時計台メディカルクリニック

様

定期交換部品		11012	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10425)	☒	合	否
ドレン用フィルターを交換したか	☒	合	否
排水シリコンチューブを交換したか	☒	合	否
オゾン分解触媒を交換したか	☒	合	否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒	合	否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付けしているか	☒	合	否
PSA性能確認			
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	☒	合	否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(93.6 %)	☒	否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.77 L/min)	☒	否
PSA圧力の確認 (0.090 Mpa) ~ (0.165 Mpa)			参考値
外装の取付			
オゾンセンサーは配線したか	☒	合	否
フロントパネルのランプは配線したか	☒	合	否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒	合	否
ドレンチューブは接続したか	☒	合	否
確認事項			
フタパッキンに剥がれはないか	☒	合	否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒	合	否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒	合	否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒	合	否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒	合	否
別紙 点検確認書に記録したか	☒	合	否
確認試験			
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒	合	否
運転は正常か、エラーはでないか	☒	合	否
インジケータの変色は良好か	☒	合	否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)