

木内クリニック

御中

点検確認書

株式会社 IHI シンパウラ
環境事業部

点検担当者：

墨住

点検年月日	平成 25 年 3 月 15 日	機種名	ONW-10	製造機番	001422
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.4 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 93.1%	流量: 0.78 L/min 圧力: 0.109~0.183 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐ 一式	
吸湿筒	交換 ☐ 一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒ 一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒ 一個	

25年3月15日

ご署名

内野

御本市西つづみヶ丘2-14-14
木内クリニック 院長 木内立野

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ

環境事業部

日付: 2013年3月15日 作業者 星 住

ONW-10機番: 001422 PSA機番: SPS-10899 客先: 木内 711ニッ 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否 (合)
ドレン用フィルターを交換したか	合/否 (合)
排水シリコンチューブを交換したか	合/否 (合)
オゾン分解触媒を交換したか	合/否 (合)
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否 (合)
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否 (合)
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内)	合/否 (合)
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (93.1 %)	合/否 (合)
酸素流量は適切か(0.73~0.82 L/min) (0.78 L/min)	合/否 (合)
PSA圧力の確認 (0.109 Mpa) ~ (0.183 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否 (合)
フロントパネルのランプは配線したか	合/否 (合)
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否 (合)
ドレンチューブは接続したか	合/否 (合)
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合/否 (合)
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否 (合)
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否 (合)
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否 (合)
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否 (合)
別紙 点検確認書に記録したか	合/否 (合)
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否 (合)
運転は正常か、エラーはでないか	合/否 (合)
インジケータの変色は良好か	合/否 (合)

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

ドレンフィルターのネジ部消耗、次回フィルター本体全体の交換が良い。