

月岡内科医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 角田

点検年月日	平成25年 2月 20日	機種名	ONW-10	製造機番	001019
設置場所				TEL	027-346-1226
設置時期	平成18年 4月4日	使用時間		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源鈕	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット鈕	正常	☒	交換	☐	
運転/停止鈕	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード鈕	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	
給水	正常	☒	調整	☐	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	
排水	正常	☒	調整	☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 90.1% 流量: 0.75 L/min 圧力: 0.081 MPa		
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	
装置内	正常	☒	調整	☐	
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸温筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

H 25年 2月 20日

二番 月岡 関夫



印

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ
環境事業部

日付: 2013.2.20

作業者: 角田

ONW-10機番: 001019

PSA機番: SPS-11015

客先: 月岡内科医院

様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10926)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否
酸素濃度の確認 (運転開始から約3分後) (90%以上) (90.1 %)	合/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min) (0.75 L/min)	合/否
PSA圧力の確認 (0.081 Mpa) ~ (0.146 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否
確認事項	
フタバッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのバッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルターは清掃したか (汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか (フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙: 点検確認書に記録したか	合/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認 (オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)