

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

02-35743

No. 121202

|     |     |                           |      |     |             |
|-----|-----|---------------------------|------|-----|-------------|
| 配布先 | 納入先 | 新鋭工業株式会社 東京支店 殿           |      | 機種  | OED-1000    |
| 客先  | 顧客名 | はとりクリニック 様                |      | 機番  | 100192      |
| 環営  | 所在地 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田 1110-1 はとりビル |      | 納入日 | 平成23年1月27日  |
| 環品  | 点検者 | 中澤 一裕                     | 作業時間 | 受付日 | 平成24年10月2日  |
|     | 返送先 | 納入先と同じ                    |      | 出荷日 | 平成24年11月29日 |
| 計   | 3   |                           |      |     |             |


## 修理依頼・不具合内容

水温高異常（E：206）  
9/13 から 10/2 まで 11 回発生した。特に 10/2 は運転不能であった。

## 不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）  
「水温高異常」は再現しました。水槽の水温を測るセンサーからの信号を  
コントロール基板が処理できず、「水温50度」と判断していました。  
水温センサーに問題は無く、コントロール基板の不具合と判断して交換、復旧しました。  
不具合品は弊社の松本工場へ送り調査依頼しました。

写真：コントロール基板

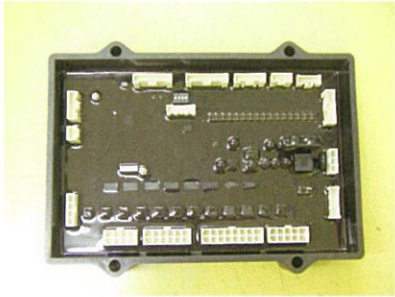

## [2] 修理・点検内容

- 1：部品交換（下表および写真をご参照ください）
- 2：性能確認・・・正常 酸素流量：0.82L/min
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の装置情報

前回定期交換日：2012/06/05 運転プログラム：Ver0105/T01.A  
交換後運転回数：151 殺菌：519、殺菌＋アルコール：226、リークチェック：1  
自己洗浄：330、アルコール単独：0、エア単独：66

—以上—

|                   |
|-------------------|
| 承認                |
| 江 24.11.30 口      |
| 審査                |
| 江 24.11.30 口      |
| 作成                |
| H24. 11. 30<br>中澤 |

| 交換部品 |          |     |    |
|------|----------|-----|----|
| 部品番号 | 部品名称     | 数量  | 備考 |
|      | コントロール基板 | 1 枚 |    |
|      |          |     |    |
|      |          |     |    |

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528