

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

|       |                                                                             |                                                                       |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                         |                                                                       | 製造番号: 100419      |
| 作業年月日 | 平成 25 年 1 月 29 日                                                            |                                                                       | 作業時間: 1.2 Hr      |
| 顧客名   | 羽田バス通りクリニック                                                                 |                                                                       | TEL: 03-5735-0808 |
| 所在地   | 東京都大田区羽田3-3-13                                                              |                                                                       | 担当 様              |
| 販売店   | サンメテックス                                                                     |                                                                       | 担当 様              |
| 納入年月日 | 23 年 11 月 28 日                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                 | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常はありませんでした。

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 450    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.75 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機器動作に異常はありませんでした。乾燥にも気を使っていたように綺麗でした。

|          |              |                |              |          |
|----------|--------------|----------------|--------------|----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 584 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌: 584      | 殺菌+7L: 0 |
|          | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 213      | 7Lアルコール単独: 0 | エア単独: 1  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|-----------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 内視鏡接続コネクタ | 次の点検時 | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 1 月 29 日

ご署名

田代 健一

(印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

山本