

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-35514

No. 130514

納入先	新鋭工業株式会社	東京支店	殿	機種	ONW-10
所在地	神奈川県横浜市港南区日野 5-3-4			機番	001071
ユーザー名	てらおか内科消化器クリニック 様			納入日	平成18年8月7日
点検者	小野定之	作業時間		受付日	平成25年4月1日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年5月14日

修理依頼・苦情内容

・給水異常（給水圧が高い為による異常）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

再現運転）・1回目通常（水道）圧約0.2mpaにて運転 給水異常は再現しませんでした。
・加圧 約0.85mpa(約4倍)にて4回運転 給水異常は再現しませんでした。
（工場では、加圧は0.85mpaまでしかできません）

処置）・給水電磁弁2個を新し物に交換（無償交換） 写真1）
・給水ホースの間に減圧弁（外付）を儲け給水圧を下げる（無償対応） 写真2）
2点の処置により給水圧を下げ給水異常に対応します



写真1）給水電磁弁 2個



写真2）減圧弁と給水ホース 1 set

[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.33～0.51mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：91.7% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.78～0.161MPa（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

承認

安
25.5.14
田

審査

中
25.5.14
澤

作成

小
13.5.14
野

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

ONW-10 に減圧弁を取付けて水道栓とつないだ写真です。

