

高沢胃腸科外科 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 菅田 和樹

点検年月日	平成25年 5月 21日	機種名	ONW-10	製造機番	000599
設置場所				TEL	
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源錠	正常 ☒	交換	☐		
フィルタリセット錠	正常 ☒	交換	☐		
運転/停止錠	正常 ☒	交換	☐		
アルコールモード錠	正常 ☒	交換	☐		
ランプ類					
操作パネル	正常 ☒	交換	☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換	☐		
洗浄動作					
フタロック	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	
給水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	
性能確認					
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: 0.5 mg/L			
オゾンインジケータ	正常 ☒				
酸素発生	正常 ☒	濃度: 95% 流量: 0.78 L/min 圧力: 0.088 ~ 0.178 MPa			
水漏れ確認					
装置外	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	
清掃					
外装	正常 ☒	清掃	☐		
内部	正常 ☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	冷却ファン作動不良があります。
吸着筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

2013年 5月 21日

菅田 和樹



内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ
環境事業部

日付: 2013.5.21

作業者 菅田和樹

ONW-10機番: 000599

PSA機番: SPS-

客先: 高次胃腸科 外科 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付けしているか	合/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否
酸素温度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (95 %)	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.78 L/min)	合/否
PSA圧力の確認 (0.088 Mpa) ~ (0.178 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否
確認事項	
フタパッキンに割がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

: 冷却ファン作動不良あり。