

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100508
作業年月日	平成 25 年 4 月 25 日		作業時間: 2.0 Hr
顧客名	立石中央クリニック		TEL: 03-5672-2225
所在地	東京都葛飾区立石7-3-4水沢ビル 1F		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 24 年 4 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シート記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常はありませんでした。

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 623
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.9 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

吸水フィルターにゴミが詰まっていたため、水の流量が少なく、殺菌開始後一時的に給水量不足の症状が出ていました。取り除き正常運転となりました。排水口の異臭が強いので、テープで補修し改善しました。

装置 情報	交換後運転回数: 210	更新 (リセット) 実施 ☒ ・ 未実施 ☐	殺菌: 62	殺菌+アル: 199
	リークチェック: 0	自己洗浄: 67	アルコール単独: 3	エア単独: /

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 4 月 25 日

ご署名

吉田 利枝



修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

