

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-41675

No. 130510

配布先	納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	中村内科胃腸科クリニック 様	機番	100543
環営	所在地	東京都葛飾区立石 1-16-3	納入日	平成 24 年 9 月 25 日
環品	点検者	中澤 一裕	作業時間	
			受付日	平成 25 年 3 月 19 日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 25 年 3 月 28 日

修理依頼・不具合内容

タッチパネル起動不良

※タッチパネル S/N : 087374H018229 DATE 05/11

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

タッチパネルを起動しても、画面全体がオレンジ色の状態のまま次の画面に移行しない現象を確認しました。
現品をタッチパネルメーカーに送付して原因を調査しています。

本機はタッチパネルを交換して復旧しました。

写真：タッチパネル



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換（下表をご参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定：0.71ppm・・・正常
- 3：オゾン水濃度信号パルス数：588・・・正常
- 4：コントロール基板の運転プログラム交換：Ver0103⇒Ver0107
- 5：酸素流量測定：0.86L/min・・・正常
- 6：運転確認・・・・・・・・・・・・・正常

[3] 出荷時の装置情報

殺菌：4 殺菌+アルコール：1 リークチェック：1 自己洗浄：2、ア単独：0 エア単独：1

一以上一

承認

審査

作成

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762302530	タッチパネル	1 個	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑVer2.71

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528