

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 130618

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店	殿	機種	ONW-10
客先	所在地	埼玉県八潮市大瀬 822-1 フレスポ八潮2-11		機番	001251
環営	ユーザー名	八潮駅前内科こどもクリニック	様	納入日	平成 18 年 9 月 19 日
	点検者	小野定之	作業時間	受付日	平成 25 年 5 月 16 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 25 年 6 月 18 日

修理依頼・苦情内容

・機械の中より水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・筐体内洗浄槽前側上部（洗浄槽とアッパパネル間）および前側下部（洗浄槽下）に水濡れ跡が多く見受けられました。（2012年9月4日フタスプリング交換時修理済み）
- ・その他、特に水漏れ跡は確認されませんでした。

再現確認）

- ・給水状態にて、30分間水漏れ確認運転を行いました但水漏れは確認できませんでした。
- ・通常運転（14モード）にて10回運転を行いました但水漏れは確認できませんでした。

処置）

- ・水漏れ確認は、できませんでしたので本機の清掃と点検確認を行いました。

〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.40～0.54mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.79L/min 圧力：0.102～0.176MPa（AC100V、50Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

承認
安 25.6.18 田
審査
中 25.6.18 澤
作成
小 25.6.18 野

部品番号	部品名称	数量	備考