

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

|       |                                                                                 |                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                             | 製造番号: 100113                                               |
| 作業年月日 | 平成 25 年 6 月 18 日                                                                | 作業時間: Hr                                                   |
| 顧客名   | 高戸橋クリニック                                                                        | TEL: 03-3200-3060                                          |
| 所在地   | 東京都新宿区高田馬場2-5-24                                                                | 担当 様                                                       |
| 販売店   | オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社                                                           | 担当 様                                                       |
| 納入年月日 | 平成 22 年 6 月 23 日                                                                | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 3 年 / 回目 | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                         |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |

## 不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/1 濃度値異常 (R: 302) 1/2 殺菌量低下 (R: 210) 7/2 流量低下 (R: 100)

## 不具合原因、作業内容

点検作業実施

## 点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 560    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input type="checkbox"/>                                        |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

## 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置内部に異常はありませんでした。殺菌槽内奥右側にキズがありました。問題ありませんでした。  
ver 0103 → ver 0109

|      |               |                                                                               |           |            |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 79 / | 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌: 2383  | 殺菌+7L: 432 |
|      | リークチェック: 12   | 自己洗浄: 35                                                                      | 7L単独: 170 | エア単独: 552  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

## お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 6 月 18 日

ご署名 高戸橋 伸子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷 3-12-5  
TEL: 03-3816-0444

責任技術者 作業者

