

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-35377

No. 130603

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機 種	ONW－10
客先	1	所 在 地	群馬県前橋市茂木町 5－5			機 番	000421
環営	1						
		ユ-ザ-名	町田内科クリニック 様			納 入 日	平成17年 8月31日
		点 検 者	小野定之	作業時間	2 H r	受 付 日	平成 25 年 4 月 19 日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成 25 年 6 月 3 日
計	2						

修理依頼・苦情内容

・給水エラーが2日に1回発生

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- 原因） ・水道よりの給水圧力が高い為に給水エラーが発生したと思われます。
再現運転） 工場での再現確認は出来ませんでした。
・水道圧にて10回運転しましたが再現しませんでした。
・水道圧の約2.5倍の0.8mpaにて加圧運転を5回運転しましたが、再現しませんでした。
- 処置） ・給水圧を下げる為に、減圧弁を取付（外付） 無償 写真1）
・故障原因である給水電磁弁の交換 写真2）
・定期交換部品の交換（酸素濃度不足対応） 写真3）



写真1）



写真2）



写真3）

〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.43～0.55mg/L ・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検 ・正常
酸素濃度：93.8% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.089～0.157MPa（AC100V, 50Hz）
- 運転動作確認 ・正常
- オゾンインジケータ変色 ・正常


—以上—

交換部品

承認	安 25.6.4 田
審査	中 25.6.4 澤
作成	小 13.6.04 野

部品番号	部品名称	数量	備考
	給水電磁弁	2個	写真2）
	吸着筒・吸湿筒	1式	写真3）
	ドレンフィルター	1個	写真3）
	オゾン分解触媒	1個	写真3）

ONW-10 に減圧弁を取付て水道栓とつないだ写真です。

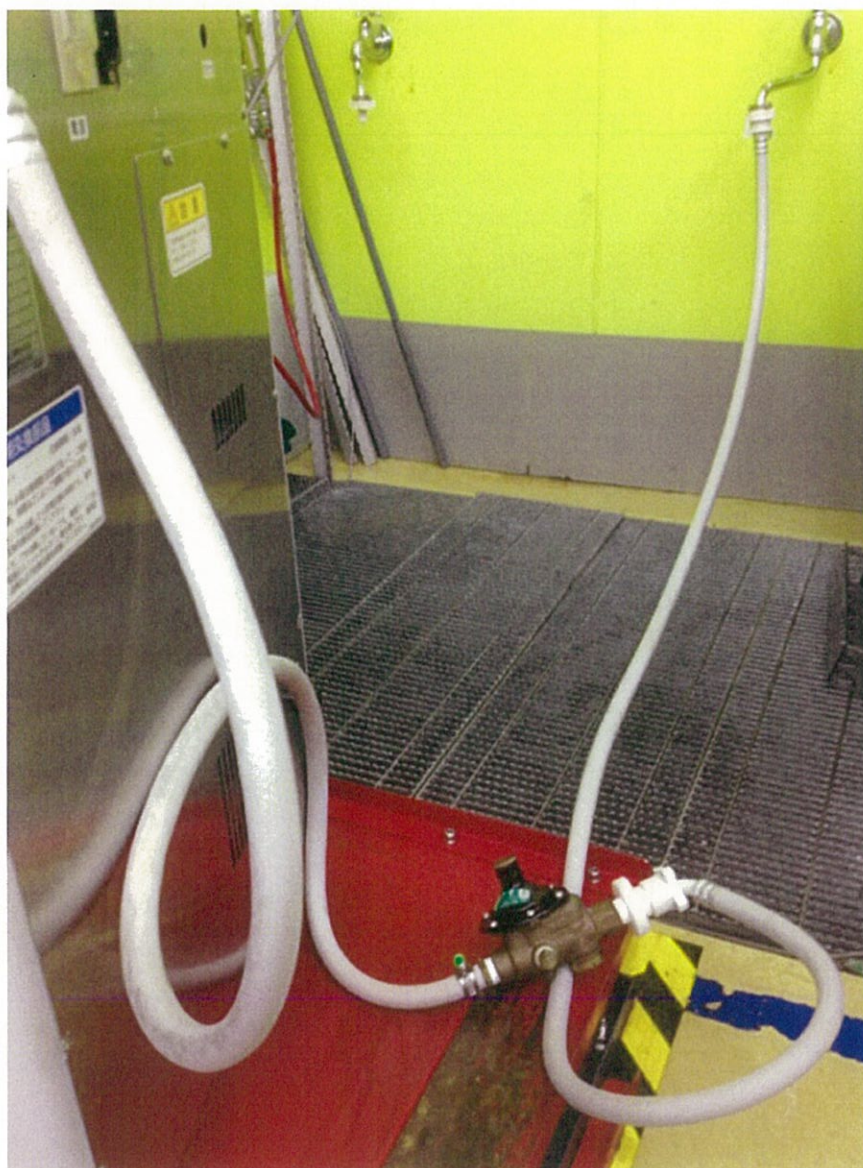

減圧弁と給水ホース 1 set

