

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100525
作業年月日	平成 25 年 7 月 2 日		作業時間: Hr
顧客名	かどた内科クリニック		TEL: 03-5604-1517
所在地	東京都荒川区南千住4-7-1 BiVi南千住3F		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 24 年 7 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

19/15 フタ開放異常 1/29 殺菌槽異常 2/8 排水異常 2/8 殺菌時給水異常 入

不具合原因、作業内容

点検作業完了

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☐	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 580
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置内部 運転動作に異常はありませんでした、スコアがオゾンバスからフジロンへ変更の為、殺菌チューブを新しくしました。 Ver0/05 → Ver 01/07

装置 情報	交換後運転回数: 450	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 3	殺菌+7L: 448
	リークチェック: 0	自己洗浄: 197	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 7 月 2 日

ご署名 松井 知恵

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

