

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100106
作業年月日	平成 25 年 7 月 3 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	つのだ医院		TEL: 045-790-3676
所在地	神奈川県横浜市金沢区能見台通1-2白樺ビル3F		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 22 年 6 月 22 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 3 年 3 回目	定期点検シート記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/4 水位低下異常

不具合原因、作業内容

点検作業完了

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 454
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置内部 異常ありと見えた。フタ部に汚れがあったので清掃致した。運転動作順調で Ver 0/03 → Ver 0/07

装置 情報	交換後運転回数: 464	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 20	殺菌+7L: 1400
	リークチェック: 1/3	自己洗浄: 8/10	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

25 年 7 月 3 日

ご署名 阿部 美奈子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

