

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	安斎医院様		機種	ONW-10
所在地	〒 狭山市 TEL		機番	001024
販売店	担当 TEL		納品日	
			依頼日	
修理者	畑村	作業時間	作業日	2013.6.12

修理依頼・苦情内容

E6で停止、リセット後は使えている

不具合原因（故障箇所）と処置内容

- ・ 圧力高で停止と思われます。
↳ 吸着筒の劣化により、吸着できず右の素が流れ、圧力高となります。
- ・ 定期交換キット交換
 - ・ 吸着筒
 - ・ 吸湿筒
 - ・ ドレンフィルタ
 - ・ 限媒
 - ・ その他の作業は後回し。

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

25 年 6 月 12 日

ご署名

安斎 博雄

安齋医院

御中

点検確認書

株式会社 IHシバウラ

点検担当者: 畑村 修

点検年月日	2013. 6 25	機種名	ONW-10	製造番号	001026
設置場所	内視鏡室			TEL	
納入時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源切	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット切	正常	☒	交換	☐		
運転/停止切	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード切	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水温度	正常	☒	濃度	0.5	mg/L	(オゾンインジケータ)
オゾンインジケータ	正常	☒				
発生酸素	正常	☒	濃度: 93.1%	流量: 0.40	L/min	圧力: 0.092 ~ 0.160 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	部材交換は 6/25 実施
吸着筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

25年 6 月 25 日

担当者 安齋医院