

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-36448

No. 120724

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機 種	O E D - 1 0 0 0
客先	1	顧 客 名	Kクリニック山王 様			機 番	1 0 0 5 3 4
環営	1						
環品	1						
		所 在 地	東京都大田区山王2 - 1 9 - 2			納 入 日	平成24年7月2日
		点 検 者	中澤 一裕	作業時間		受 付 日	平成24年7月4日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成24年7月23日
計	3						

修理依頼・不具合内容

オゾン水生成異常（E：207）

7/4に4回運転した後、内視鏡以外の物を機械に入れて洗ったらその後異常が出て動かなくなった。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オゾン発生装置に水が逆流しており、この水が原因でオゾン水生成能力が低下して異常が発生しました。なぜこのような現象が起きたか引き続き調査いたします。本機械はオゾン発生装置の内部を乾燥して復旧しました。

写真1：オゾン発生装置


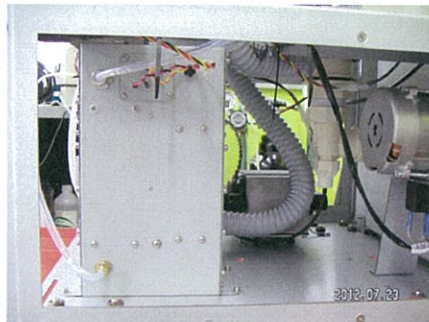


写真2：配管内部の逆流した水

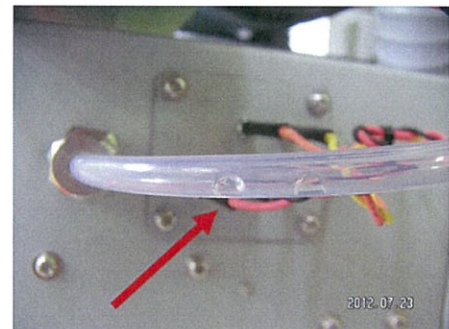

〔2〕修理・点検内容

- 1：オゾン発生装置内部乾燥
- 2：性能確認・・・正常 酸素流量：0.8L/min
- 3：運転確認・・・正常 殺菌履歴：0.67ppm
- 4：出荷時の装置情報

前回定期交換日：2012/07/02 運転プログラム：Ver0104/T01.A
交換後運転回数：18 殺菌：15、殺菌＋アルコール：3、リークチェック：1
自己洗浄：5、アルコール単独：1、エア単独：2

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考

承認

江
24.7.24
口

審査

江
24.7.24
口

作成

H24.7.24
中澤

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528