

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号：100547
作業年月日	平成 25 年 7 月 8 日	作業時間： 1.2 Hr
顧客名	中田内科クリニック	TEL：0422-28-4600
所在地	東京都武蔵野市吉祥寺北町2-1-14	担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 24 年 7 月 18 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴
1/6 バグによる異常 4, 殺菌槽異常

不具合原因、作業内容
点検作業実施

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 323
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 2.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
装置内部に異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 254	更新（リセット） ☒ 未実施	殺菌： 142	殺菌+7L： 112
	リークチェック： 0	自己洗浄： 79	アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

1425 年 7 月 8 日
ご署名 中田 哲也 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 東京支店 東京都文京区本郷3-12-5 TEL：03-3816-0444	責任技術者	西野	作業者	山本
------	--	-------	----	-----	----