

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100146
作業年月日	平成 25 年 6 月 19 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	元住吉クリニック		TEL: 044-422-4077
所在地	神奈川県川崎市中原区木月2-12-18		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 23 年 6 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 2 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴
不具合や異常はありませんでした。

不具合原因、作業内容
点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 570
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
装置内部、動作は正常でした。 酸素業者の連絡先を紹介しました。
Ver 0103 → Ver 0107

装置 情報	交換後運転回数: 76	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 181	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 151	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

25. 6. 19 月 日

ご署名 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	