

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-3583

No. 130813

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	東京都練馬区春日町 4-18-1			機番	000925
環営	ユーザー名	加藤医院 様			納入日	平成17年10月27日
	点検者	小野定之	作業時間	4Hr	受付日	平成25年6月28日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年8月13日
計	2					

修理依頼・苦情内容

・現状の確認およびオーバーホール

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

現状）・酸素濃度不足 67.4% （合格値90%以上）

原因）・定期交換部品の劣化（定期交換1年目、2年目の未実施）

処置）・定期交換部品の交換

写真1）参照

吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルター、オゾン分解触媒

・オーバーホールによる部品交換（性能劣化による交換部品）

写真2）参照

水ポンプ、水位レベルセンサー、給水電磁弁、排水チューブ

写真1）



写真2）



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.38～0.53mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.9% 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.093～0.165MPa（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認

安
25.8.13
田

審査

中
25.8.13
澤

作成

小
25.8.13
野

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	吸着筒、吸湿筒	1式	定期交換部品
	ドレンフィルター	1個	定期交換部品
	オゾン分解触媒	1個	定期交換部品
	水ポンプ	3個	
	水位レベルセンサー	3本	
	給水電磁弁	2個	
	排水チューブ	1本	