

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 130822

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	埼玉県北本市宮内 1-212			機番	000639
環営	ユーザー名	藤倉医院 様			納入日	平成 17 年 1 月 26 日
	点検者	小野定之	作業時間	6 Hr	受付日	平成 25 年 6 月 20 日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 25 年 8 月 22 日

修理依頼・苦情内容

- ・排水エラー（洗浄槽内異物の発生）
- ・定期交換（2 年目）＋オーバーホール見積り

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

原因）・排水チューブおよびホース内に異物が発生し不具合が発生したと思われます。
・水ポンプ（P-3）、排水電磁弁、水位センサー（LVL）、配管チューブ、パッキンの性能劣化も故障原因と思われます。

処置）・洗浄槽漬け置き洗浄による洗浄機（水系）内部清掃・・・約 1 週間

・定期交換部品（2 年目）の部品交換

写真 1）参照

・故障原因部品の交換

写真 2）参照

・性能劣化部品の交換

写真 3）参照

写真 1）定期交換部品（2 年目）

写真 2）故障原因部品

写真 3）性能劣化部品

吸着筒、吸湿筒
ドレンフィルター
オゾン分解触媒

水ポンプ (P-3)
水位レベルセンサー (LVL)
配管チューブ、パッキン

フタスプリング
オゾンセンサー
水ポンプ (P-1, P-2)



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。

2. オゾン水濃度測定：0.38～0.59mg/L・・・正常

3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：93.5 % 酸素流量：0.74 L/min 圧力：0.098～0.168MPa（AC100V、50Hz）

4. 運転動作確認・・・正常

5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762280770	定期交換部品（2 年目）	1 式	
762301130	水ポンプ（P-1、P-2、P-3）	3 台	
762301110	排水電磁弁（抵抗 ASSY 含む）	1 個	
762301210	水位レベルセンサー（LVL）	1 本	
762301322	オゾンセンサー	1 個	
	配管チューブ、パッキン	1 式	他）フタスプリング

承認

安
25.8.22
田

審査

中
25.8.22
澤

作成

小
13.8.22
野