

たなか医院 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者:

点検年月日	平成25年 9月 9 日	機種名	ONW-10	製造機番	001815
設置場所				TEL	0276-622881
設置時期	2009年 6月 28日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☒
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.4 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.6%	流量: 0.18 L/min 圧力: 0.103~0.18 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

H25年 9月 9日

ご署名 田中 亨 印

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ
環境事業部

日付: 2013. 09-09

作業者 前田

ONW-10機番: 001815

PSA機番: SPS- 11273

客先: たなか医院

様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 01790)	○/否
ドレン用フィルターを交換したか	○/否
排水シリコンチューブを交換したか	○/○
オゾン分解触媒を交換したか	○/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	○/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	○/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	○/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (92.6 %)	○/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.78 L/min)	○/否
PSA圧力の確認 (0.103 Mpa) ~ (0.182 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	○/否
フロントパネルのランプは配線したか	○/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	○/否
ドレンチューブは接続したか	○/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	○/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	○/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	○/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	○/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	○/否
別紙 点検確認書に記録したか	○/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	○/否
運転は正常か、エラーはでないか	○/否
インジケータの変色は良好か	○/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

否...点検対象外