

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100365	
作業年月日	平成 25 年 9 月 9 日		作業時間	1.5 Hr	
顧客名	日吉台病院		TEL	047-692-0001	
所在地	千葉県富里市日吉台1-6-2		担当	様	
販売店	株式会社 メディセオ		担当	様	
納入年月日	平成 23 年 9 月 29 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2 年 2 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常、不具合はありませんでした。			
不具合原因、作業内容			
点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 376
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
装置内部、運転動作に異常ありませんでした。 トレー上での操作部を作業箇所に変更がなければ Ver 0/03 → Ver 0/07			

装置 情報	交換後運転回数	494	更新（リセット）実施・未実施	殺菌	667	殺菌+7L	81
	リークチェック	0	自己洗浄	22	7L単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 新藤 一智		

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者	作業者