

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 小野

点検年月日	25年 9月 24日	機種名	ONW-10	製造機番	000191
設置場所	春日部厚生病院	TEL:			
設置時期	17年 10月 22日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.8	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 99.3% 流量: 0.76 L/min 圧力: 0.01 ~ 0.129 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	
* OY-01-A257	交換 ☒	1個	

H25年 9月24日

ご署名 林 伸浩

印

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ

環境事業部

日付: 1125.9.28

作業者 小野

ONW-10機番: 000191

PSA機番: SPS-10286

客先: 春日部厚生病院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合	否
ドレン用フィルターを交換したか	合	否
排水シリコンチューブを交換したか	合	否
オゾン分解触媒を交換したか	合	否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合	否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合	否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合	否
酸素濃度の確認 (運転開始から約3分後) (90%以上)	(83.3 %)	合 否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)	(0.76 L/min)	合 否
PSA圧力の確認 (0.101 Mpa) ~ (0.123 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合	否
フロントパネルのランプは配線したか	合	否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合	否
ドレンチューブは接続したか	合	否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合	否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合	否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか (汚れある場合清掃)	合	否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合	否
定期点検カウンタをリセットしたか (フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合	否
別紙 点検確認書に記録したか	合	否
確認試験		
オゾン水濃度の確認 (オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合	否
運転は正常か、エラーはでないか	合	否
インジケータの変色は良好か	合	否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

エラー "8" 発生

- ・ オゾンガス タイト 部 異物により オゾンガス漏れ、(清掃済み)
- ・ オゾン電圧計 (旧型) を新型に部品交換