

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 130926

納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW-10
所在地	茨城県つくばみらい市絹の台 2-10-1			機番	000472
ユーザー名	ふなやま内科クリニック 様			納入日	平成 17 年 8 月 29 日
点検者	小野定之	作業時間	Hr	受付日	平成 25 年 8 月 23 日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 25 年 9 月 26 日

修理依頼・苦情内容

エラー“9”および洗浄槽異物清掃

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

原因）排水ホースならび背面ホース内部に多くの異物の発生によりエラー原因となったと思われます。

処置）洗浄槽を塩素系洗剤にて約1週間漬け置き洗浄を実施しました。

一部汚れの残る部分の部品を交換しました。（写真1参照）

無償

結果）清掃後の運転確認では、エラー“9”の発生はしませんでした。

写真1）排水チューブ、ゴムホース



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。

2. オゾン水濃度測定：0.48～0.54 mg/L・・・正常

3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：92.5% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.091 ～ 0.160MPa（AC100V、50 Hz）

4. 運転動作確認・・・正常

5. オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	排水チューブ	2本	
	ゴムホース	2本	

承認

若
13.9.26
井(-)

審査

若
13.9.26
井(-)

作成

小
13.9.26
野