

115期駅前 ^{ニビル} 内科クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 廣瀬

点検年月日	平成20年 8月 30日	機種名	ONW-10	製造機番	001251
設置場所				TEL	
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果						
スイッチ類							
電源釦	正常	☒	交換	☐			
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐			
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐			
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐			
ランプ類							
操作パネル	正常	☒	交換	☐			
蛍光灯	正常	☒	交換	☐			
洗浄動作							
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☐	未使用	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
性能確認							
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒					
酸素発生	正常	☐	濃度: 92.2%	流量: 0.75	L/min	圧力: 0.073~0.105	MPa
水漏れ確認							
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
清掃							
外装	正常	☒	清掃	☐			
内部	正常	☒	清掃	☐			
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	両点検、再測定の結果、酸素濃度は正常値。 ※ トレイ一部破損。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

25 年 8 月 30 日

ご署名 稲村健太郎

印