

大林内科 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 小野

点検年月日	平成25年 10月 30日	機種名	ONW-10B	製造機番	001473
設置場所	埼玉県川口市千鳥 656-1	TEL	0280-93-8856		
設置時期	2008.12.26.	使用時間	1515	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ (未使用)	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素配管	正常	☒		
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	一個	

25年 10月 30日

ご署名 日高

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 ONW-10B 作業チェックリスト

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

日付: 26 年 10 月 20 日 作業者 小野

ONW-10 B 機番: 00 / 423 客先: 大林内科 様

定期交換部品	
排水シリコンチューブを交換したか	合 / ☒ 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合 / 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合 / 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合 / 否
酸素ガス配管確認	
ボンベレギュレーターの圧力計の指針は正常に動くか	☒ 合 / 否
ボンベレギュレータの二次側圧力は正常か(0. 21~0. 29Mpa)	☒ 合 / 否
酸素ボンベ~ONWまでの配管に漏れは無いか	☒ 合 / 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.76 L/min)	☒ 合 / 否
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合 / 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合 / 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合 / 否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合 / 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合 / 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合 / ☒ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合 / 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合 / 否
確認試験	
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合 / 否
オゾン水濃度の確認(0.3mg/L以上)	☒ 合 / 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合 / 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合 / 否
運転プログラムのバージョン確認 (平成21年6月現在「11」が最新)	☒ 合 / 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)