

みやの杜7127 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 菅田 和樹

点検年月日	平成25年 11月 7日	機種名	ONW-10	製造機番	000374
設置場所		使用時間		TEL	
設置時期				御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源鈕	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット鈕	正常	☒	交換	☐
運転/停止鈕	正常	☒	交換	☐
アルコールモード鈕	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.3	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 9.5 %	流量: 0.8 L/min 圧力: 0.087 ~ 0.169 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸温筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

2013年 11月 7日

氏名 廣瀬 誠



印

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社HIIシバウラ
環境事業部

日付: 2013.11.7 作業者 菅田和樹

ONW-10機番: 000374 PSA機番: SPS- 11169 客先: みやの杜 74-7 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 10792)	○/否
ドレン用フィルターを交換したか	○/否
排水シリコンチューブを交換したか	○/否
オゾン分解触媒を交換したか	○/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	○/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	○/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	○/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (95 %)	○/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min) (0.8 L/min)	○/否
PSA圧力の確認 (0.087 Mpa) ~ (0.169 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	○/否
フロントパネルのランプは配線したか	○/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	○/否
ドレンチューブは接続したか	○/否
確認事項	
フタパッキンに割がれはないか	○/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	○/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	○/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	○/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	○/否
別紙 点検確認書に記録したか	○/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	○/否
運転は正常か、エラーはでないか	○/否
インジケータの変色は良好か	○/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)