

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100211
作業年月日	平成 25 年 10 月 30 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	日新外科胃腸科医院		TEL: 047-854-5977
所在地	千葉県香取市北3-13-10		担当 様
販売店	株式会社 メディセオ		担当 様
納入年月日	平成 22 年 10 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検ソール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/19 オゾンソール異常 (エラー) x2

不具合原因、作業内容

定期点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 499
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置内部、運転動作異常なし。一日の最後は自己洗浄を必ず行なって下さい。また排水栓にゴミがたまると、チェックして下さい。Ver 0/03 → Ver 0/07

装置情報	交換後運転回数: 119	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 239	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: ☒	7Lコールド: 0	エア単独: 11

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

25 年 10 月 30 日

ご署名 宇津 又 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	山本