

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100085
作業年月日	平成 25 年 10 月 15 日	作業時間: 1.5 Hr
顧客名	あさい内科クリニック	TEL: 0468-88-2217
所在地	神奈川県三浦市初声町入江76-1	担当 様
販売店	株式会社 メディセオ	担当 様
納入年月日	平成 22 年 9 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合はありませんでした。

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パネル数 597
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置内部運転動作に異常はありませんでした。とてと本号機に使用されておりました。

Ver.0/03 → Ver.0/07. 背面パネルのネジ 左上と右月は短く交換しました。

装置 情報	交換後運転回数: 88	更新 (リセット) ☒ 未実施	殺菌: 7	殺菌+7ル: 446
	リークチェック: 80	自己洗浄: 4/0	7ル単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

25 年 10 月 15 日

ご署名

成井 守和

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

