

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

|       |                                                                                 |                                                            |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                             |                                                            | 製造番号: 100114      |
| 作業年月日 | 平成 25 年 10 月 1 日                                                                |                                                            | 作業時間: Hr          |
| 顧客名   | 丹野病院                                                                            |                                                            | TEL: 029-226-6555 |
| 所在地   | 茨城県水戸市酒門町4887                                                                   |                                                            | 担当 様              |
| 販売店   |                                                                                 |                                                            | 担当 様              |
| 納入年月日 | 平成 22 年 9 月 29 日                                                                | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 3 年 3 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>              |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合はありませんでした。

不具合原因、作業内容

定期点検作業実施

点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 486    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置内部、運転動作に異常はありませんでした。 Ver0.02 → Ver0.01

|          |                                                                     |           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 2/8 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施 | 殺菌: 689   | 殺菌+7L: 7   |
|          | リークチェック: /                                                          | 自己洗浄: 170 | 7Lコール単独: 0 |
|          |                                                                     |           | エア単独: 12   |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

25 年 10 月 1 日

ご署名



印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店  
東京都文京区本郷3-12-5  
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

