

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-35400

No. 131115

納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW-10
所在地	埼玉県坂戸市関戸 4-15-15			機番	000463
ユーザー名	大野外科内科クリニック 様			納入日	平成 17 年 5 月 30 日
点検者	小野定之	作業時間	6 Hr	受付日	平成 25 年 10 月 9 日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 25 年 11 月 15 日

修理依頼・苦情内容

- ・運転中ブレーカトリップ発生（プラグとコンセントに焦げ）
- ・オーバーホール依頼

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・ブレーカトリップによる本機側のトラブルはありませんでした。
- ・定期交換部品および性能劣化した部品を交換しました。 写真1）、2）、3）参照

写真1）定期交換部品（2年目）

吸着筒、吸湿筒
ドレンフィルター
オゾン分解触媒



写真2）性能劣化部品

電源コード、フタスプリング
オゾンセンサー、排水電磁弁
抵抗 ASSY、配管チューブ、
パッキン、フィルター2（欠損品）



写真3）性能劣化部品

水ポンプ（P-1, P-2, P-3）
水位レベルセンサー（LVL, LVH1,
LVH2）、エアコンプレッサー



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.49～0.66 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.5% 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.083 ～ 0.157 MPa（AC100V、50Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762280770	定期交換部品（2年目）	1 式	
762361440	電源コード	1 本	
762301130	水ポンプ	3 個	
762301322	オゾンセンサー	1 個	
762301230他	水位レベルセンサー	3 本	
762300840	エアコンプレッサー	1 個	他、写真参照

承認

若
13.11.15
井(-)

審査

若
13.11.15
井(-)

作成

小
13.11.15
野