

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100072
作業年月日	平成 25 年 9 月 10 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	渡辺昭医院		TEL: 03-3651-6500
所在地	東京都葛飾区新小岩2-19-15		担当 様
販売店	東邦薬品 株式会社		担当 様
納入年月日	22 年 9 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目	定期点検ソール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/12, 8/6, 8/24, 9/7: 濃度維持異常 (E: 202)
9/7: 排水異常 2 (E: 202)

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 3/D
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 2.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置内部、運転動作に異常はありませんでした。酸素ポンプの残量からかなりの交換が必要。

装置 情報	交換後運転回数: 1083	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 1054	殺菌+アル: 1815
	リークチェック: 6/19	自己洗浄: 7/11	アルコール単独: 2	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	
オゾン水濃度計		☒	/			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H25 年 9 月 10 日

ご署名

加藤

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

