

和国 7/12/27

御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 1-181

点検年月日	H24年 11月 28日	機種名	ONW-10B	製造機番	001685
設置場所				TEL:	
設置時期	H24年 10月 28日	使用回数	633	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.6	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生 (5分使用)	正常	☒	濃度: ※	流量: 0.76	L/min	圧力: MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☒		
内部	正常	☒	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

2013年 11月 28日

ご署名 加藤 修

印

内視鏡洗浄機 ONW-10B 作業チェックリスト

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

日付: 2015年 11月 28日 作業者 山本

ONW-10B 機番: 001685

客先: 和月 29-27 様

定期交換部品	
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合 / 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合 / 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合 / 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合 / 否
酸素ガス配管確認	
ボンベレギュレーターの圧力計の指針は正常に動くか	☒ 合 / 否
ボンベレギュレータの二次側圧力は正常か(0.21~0.29Mpa)	☒ 合 / 否
酸素ボンベ~ONWまでの配管に漏れは無い	☒ 合 / 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.76 L/min)	☒ 合 / 否
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合 / 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合 / 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合 / 否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合 / 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合 / 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合 / 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合 / 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合 / 否
確認試験	
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合 / 否
オゾン水濃度の確認(0.3mg/L以上)	☒ 合 / 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合 / 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合 / 否
運転プログラムのバージョン確認 (平成21年6月現在「11」が最新)	☒ 合 / 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

プログラムの次回訪問時変更。