

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-44502

No. 131125

納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW-10
所在地	埼玉県さいたま市桜区南本宿 1-15-15			機番	000457
ユーザー名	立花医院 様			納入日	平成 17 年 9 月 24 日
点検者	小野定之	作業時間	3 Hr	受付日	平成 25 年 10 月 29 日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 25 年 11 月 25 日

修理依頼・苦情内容

- ・性能確認（状況を教えて欲しい）
- ＊引っ越しがあった為

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

結果）・吸着筒、吸湿筒の性能劣化により酸素濃度が規定値を下回っていました。

- ・オゾンセンサーの性能劣化を確認しました。
- ・排水チューブ、パッキンの性能劣化を確認しました。

処置）・性能劣化部品である吸着筒、吸湿筒の交換を行いました。（定期交換部品 2 年目）

- ・性能劣化部品であるオゾンセンサーの交換を行いました。
- ・性能劣化部品である排水チューブおよびパッキンの交換を行いました。 写真参照）


写真 1）定期交換部品 2 年目

吸着筒、吸湿筒、オゾン分解触媒、
ドレンフィルター



写真 2）性能劣化部品

オゾンセンサー、
排水チューブ、パッキン

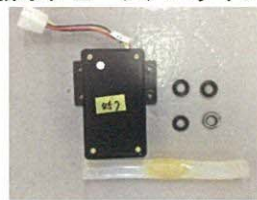

[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.50～0.60 mg/L ・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検 ・正常
酸素濃度：91.6 % 酸素流量：0.80 L/min 圧力：0.087 ～0.159 MPa（AC100V、50Hz）
4. 運転動作確認 ・正常
5. オゾンインジケータ変色 ・正常

—以上—

交換部品

承認				
若 13.11.25 井(-)				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
若 13.11.25 井(-)	762280770	定期交換部品（2年目）	1式	
	762301322	オゾンセンサー	1個	
		排水チューブおよびパッキン	1式	
作成				
小 13.11.25 野				