

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 小野

点検年月日	2025年 12月 3日	機種名	ONW-10	製造機番	001068
設置場所				TEL:	
設置時期	2006年 1月 26日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 95% 流量: 0.8 L/min 圧力: 0.093~0.103 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	エラー2 水漏れ 142-1 11月10日 192-1 11月10日 21日10日 修理、水位センサー LHV1、LHV2 排水40-7、フラスコ127 交換
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

年 月 日

ご署名 小野 亨夫

印

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 1/28. 12. 3 ~ 作業者 4 (4)

ONW-10機番: 001064

PSA機番: SPS-

客先: 埼玉野村病院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否	(合)
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	(合)
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	(合)
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	(合)
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	(合)
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	(合)
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否	(合)
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (33.8 %)	合/否	(合)
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.8 L/min)	合/否	(合)
PSA圧力の確認 (0.093 Mpa) ~ (0.163 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	(合)
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	(合)
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	(合)
ドレンチューブは接続したか	合/否	(合)
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	(合)
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	(合)
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	(合)
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	(合)
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	(合)
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	(合)
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否	(合)
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	(合)
インジケータの変色は良好か	合/否	(合)

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)