

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号

02-35379

No. 131209

納入先	新鋭工業株式会社 東京支店		殿	機種	ONW-10
所在地	東京都板橋区常盤台1-2-3新光常盤台ビル4F			機番	000315
ユーザー名	元内科医院		様	納入日	平成15年5月29日
点検者	小野定之	作業時間	3Hr	受付日	平成25年7月8日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成25年12月9日

修理依頼・苦情内容

・給水異常および排水異常

不具合原因 (故障箇所) と処置

[1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

定期交換部品および不具合原因部品を交換しました。

写真1) 定期交換部品
 吸着筒・吸湿筒・オゾン分解触媒
 ドレンフィルター



写真2) 不具合部品
 水位レベルセンサー (LVL)
 排水チューブ



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換: 下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定: 0.48~0.59 mg/L・・・正常
3. PSA (酸素発生装置) 性能点検・・・正常
 酸素濃度: 91.9% 酸素流量: 0.78 L/min 圧力: 0.088~0.161MPa (AC100V、50 Hz)
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762280780	定期交換部品2年目	1式	
762301210	水位レベルセンサー (LVL)	1本	
762231680	排水チューブ	1本	

承認
若井 (13/12/09)
審査
若井 (13/12/09)
作成
小野 (13/12/09)