

12月27日 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 小野

点検年月日	12月 27日	機種名	ONW-10	製造機番	001054
設置場所		使用時間	1927回	TEL:	
設置時期	H18年 11月 30日	御対応者			

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認	17℃ 19℃			
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.6 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒	濃度: 92.2% 流量: 0.74 L/min 圧力: 0.096 ~ 0.162 MPa	交換
酸素発生	正常	☒	濃度: 67.3% 流量: 0.7 L/min 圧力: 0.15 ~ 0.263 MPa	交換
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	・100g 3本 8"を10"に変更
吸湿筒	一式	・2本 8" (オゾンシリンダー交換)
ドレン用フィルタ	一個	・2本 10" (オゾンシリンダー交換)
オゾン分解触媒	一個	・2本 10" (オゾンシリンダー交換)
オゾンシリンダー	1個	

2018年12月18日
ご署名 小野

印

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 1425.12.13.

作業者 小川

ONW-10機番: 001054

PSA機番: SPS-11215

客先: 1207079277

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-1059)	☒ 合 / ☐ 否	
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合 / ☐ 否	
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合 / ☐ 否	
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合 / ☐ 否	
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合 / ☐ 否	
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合 / ☐ 否	
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	☒ 合 / ☐ 否	
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(92.2 %)	☒ 合 / ☐ 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.74 L/min)	☒ 合 / ☐ 否
PSA圧力の確認	(0.096 Mpa) ~ (0.162 Mpa)	参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合 / ☐ 否	
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合 / ☐ 否	
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合 / ☐ 否	
ドレンチューブは接続したか	☒ 合 / ☐ 否	
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合 / ☐ 否	
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合 / ☐ 否	
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合 / ☐ 否	
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合 / ☐ 否	
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合 / ☐ 否	
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合 / ☐ 否	
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 合 / ☐ 否	
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合 / ☐ 否	
インジケータの変色は良好か	☒ 合 / ☐ 否	

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

107908の10変更.