

保守点検・修理 報告書

(会社用)

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100615
作業年月日	平成 25 年 12 月 17 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	ひらお循環器科内科クリニック 様		TEL: 047-487-1515
所在地	千葉県八千代市ゆりのき台5-1-1イーグル八千代ビル1F		担当 様
販売店	株式会社 スズケン		担当 様
納入年月日	平成 24 年 12 月 10 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☒ 12月25年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
OED-1000定期保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 485
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
作動確認、定期交換部品の交換を実施。(片回キヤン内対応の為、サ-ビス) Ver. 0104 / T01.A ⇒ 中野さんにて問題なし			

装置 情報	交換後運転回数: 409	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 6	殺菌+7L: 403
	リークチェック: 0	自己洗浄: 227	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒				☐	
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄		2025 年 12 月 17 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。		医療法人社 ぽ ひらお循環器科内科クリニック ご署名 理事長 平尾 大吾 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
 東京都文京区本郷3-12-5
 TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	土屋