

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 小野

点検年月日	平成 26 年 / 月 14 日	機種名	ONW-10B	製造機番	001681
設置場所				TEL	
設置時期	1421 年 6 月 22 日	使用時間	86	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	☒ 0.6 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素配管	正常	☒				
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☐	清掃	☒		
内部	正常	☐	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
オゾン分解触媒	一個	・フィルター異物・異臭・解除 ・定期メンテナンス実施

2014 年 1 月 14 日

ご署名 小野 〇子 印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 ONW-10B 作業チェックリスト

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

日付: H26 年 / 月 / 日 作業者 小野

ONW-10B 機番: 001681

客先: 松田整形外科

様

定期交換部品	
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否
酸素ガス配管確認	
ボンベレギュレーターの圧力計の指針は正常に動くか	合/否
ボンベレギュレータの二次側圧力は正常か(0.21~0.29Mpa)	合/否
酸素ボンベ~ONWまでの配管に漏れは無い	合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.75 L/min)	合/否
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否
確認試験	
別紙 点検確認書に記録したか	合/否
オゾン水濃度の確認(0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否
運転プログラムのバージョン確認 (平成21年6月現在「11」が最新)	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)