

新緑会館 グリーン 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 小野

点検年月日	平成 26 年 1 月 29 日	機種名	ONW-10	製造機番	000187
設置場所	2F (11号)			TEL	048-990-0777
設置時期	平成 20 年 3 月 25 日	運転回数	2108	御対応者	工藤 様

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.6 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 91.3 %	流量: 0.78 L/min 圧力 2.108 ± 0.02 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☒ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☒ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☒
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	コメント・定期交換/年1回(松本様) ・大3号翼管の不具合発生(付付様より) ・今回は矢張り、 ・内装品2点全引取り中 ・12月に内装品洗浄等工場で清掃依頼
吸湿筒	交換 ☐	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	
オゾン分解触媒	交換 ☒	
	交換 ☐	
	交換 ☐	

ご署名

工藤

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシパウラ

環境事業部

日付: H26. 1. 29.

作業者 小野

ONW-10機番: 000187

PSA機番: SPS-

客先: 南越谷健康センター様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (91.3 %)		合/否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.78 L/min)		合/否
PSA圧力の確認 (0.108 0.108 Mpa) ~ (0.180 Mpa)		参考値
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
ドレンチューブは接続したか		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

定期交換 / 毎月(松本様)