

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100656
作業年月日	平成 26 年 2 月 3 日		作業時間: 2.5 Hr
顧客名	北柏胃腸科外科		TEL: 047-160-2100
所在地	千葉県柏市北柏3-2-6ロイヤルビル北柏2階		担当 様
販売店	富士フィルムメディカル		担当 様
納入年月日	平成 25 年 2 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合はありませんでした。

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業及び給水用糸巻き・活性炭フィルタ交換実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 604
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置内部、運転動作に異常はありませんでした。フタ部清掃。排水ホースが奥まで入っていませんので次回交換を推奨。Ver 0105 → Ver 0107

装置 情報	交換後運転回数: 1228 更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 2/8	殺菌+7L: 8/0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 274	7L単独: 0
		エア単独: 1	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

平成 26 年 2 月 3 日

ご署名 生駒 三枝子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

