

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-44509

No. 140213

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店		機 種	ONW - 10	
客先	所在地	群馬県前橋市茂木町 5 - 5		機 番	000421	
環営	ユーザー名	町田内科クリニック 様		納入日	平成 17年 8月 31日	
	点検者	小野定之	作業時間	2 Hr	受付日	平成 26年 1月 14日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 26年 2月 13日	

修理依頼・苦情内容

エラー“0”発生 給水量不足
以前と同じで直っていないのではないかと

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

原因）・水位レベルセンサー（LVL）の劣化による誤作動と思われます。
再現確認運転で再現確認出来ました。

処置）・不具合原因である水位レベルセンサー（LVL）を交換しました。
以後の運転では、エラー“0”は発生しませんでした。

写真）1

水位レベルセンサー（LVL）



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.42～0.62mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.0 % 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.097 ～0.170 MPa（AC100V, 50 Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

以上

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
若井 '14/02/13	762301210	水位レベルセンサー（LVL）	1本	
審査				
若井 '14/02/13				
作成				
小野 '14/02/13				

